

NEAUVIA™

THE ADVANCED HOLISTIC APPROACH



PLASMA IQ
DEVICE

ENHANCE
EVERY
EXPRESSION

PLASMA IQ

**Przenośne Urządzenie
do Mikroelektrochirurgii**

**Wzmocnij
każdą
ekspresję**



Urządzenie Plasma IQ wykorzystuje mikrowiązkę plazmy, mającą na celu korygowanie i przebudowę skóry poprzez miejscową sublimację przy minimalnym okresie rekonwalescencji.

Plasma IQ jest szczególnie popularna w korekcji opadających powiek górnych oraz zwalczania wiotkości powiek dolnych, stanowi nieinwazyjne alternatywne rozwiązanie dla blefaroplastyki chirurgicznej. Dodatkowo wykorzystywana jest w korekcji kurzych łapek, zmarszczek i blizn. Jednocześnie może być stosowana w usuwaniu zmian skórnych (naczyniaki rubinowe, kępki żółte itp.).

**URZĄDZENIE MEDYCZNE
oznakowane znakiem CE**

**ZATWIERDZONE
PRZEZ FDA**


JAK DZIAŁA PLASMA?

PLASMA IQ wykorzystuje zjawisko fizyczne zwane sublimacją plazmową, które powoduje kontrolowane i bardzo precyzyjne uszkodzenie skóry, powodując napięcie i retrakcję skóry.

Podczas zbliżania urządzenia do powierzchni skóry, dochodzi do jonizacji cząsteczek gazu w powietrzu. Pomiędzy końcówką zabiegową, a skórą tworzy się łuk plazmowy, który wygląda jak iskra.

Łuk plazmowy powoduje sublimację naskórka - przekształcenie ciała stałego w gaz, co powoduje natychmiastowe obkurczenie i napięcie skóry w docelowym obszarze zabiegowym. Metoda sublimacji plazmowej charakteryzuje się wysoką precyzyjnością i łatwością jej kontrolowania. Dodatkowym atutem jest fakt, że obszar otaczający pole zabiegowe nie jest przypadkowo przegrzewany podczas zabiegu.

1

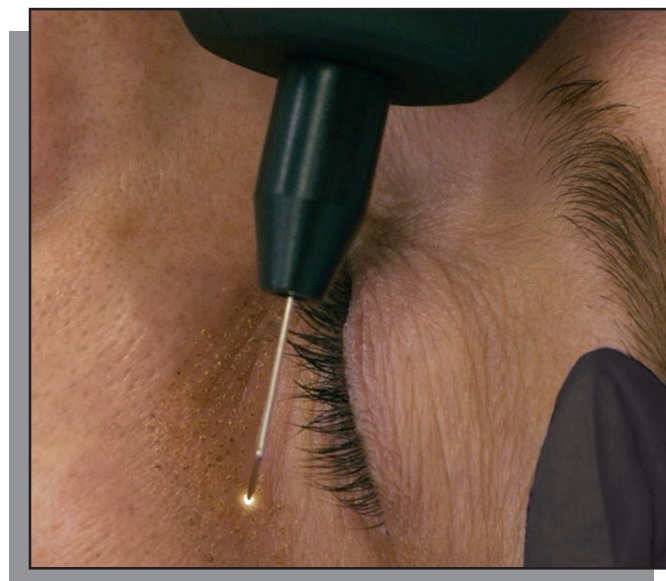

2



Po przeprowadzonej procedurze na powierzchni skóry tworzą się drobne strupki, utrzymujące się około tygodnia.

3

Powstałe podczas zabiegu mikrouszkodzenia stymulują fibroblasty, co pobudza proces neokolagenogenezy. Rezultatem jest długofalowy efekt ujędrnienia, napięcia i wygładzenia, który jest częścią naturalnego procesu gojenia.

4

SMART ENERGY

► Absolutna precyzja

- 4 poziomy mocy, w tym możliwość pracy w obiegu zamkniętym i otwartym, zwiększają możliwości precyzyjnego dopasowania zabiegu do każdego rodzaju skóry i obszaru, od cienkiej i delikatnej do grubej skóry.
- Dostarczenie precyzyjnej ilości energii podczas zabiegu pozwala na skrócenie czasu rekonwalescencji, przyspiesza gojenie i minimalizuje ryzyko wystąpienia lub nasilenia efektów ubocznych.
- Wysokiej jakości elektroda zabiegowa dostarcza ukierunkowaną energię dla uzyskania lepszych rezultatów. Mniejsza powierzchnia uszkodzenia ogranicza czas rekonwalescencji i ułatwia wystąpienie procesów gojenia.
- Maksimum ergonomiczności dzięki bezprzewodowemu urządzeniu.

► Niski koszt zakupu i zużycia

ZASTOSOWANIE

- Blizny potrądzikowe
- Naczyniaki rubinowe
- Zmarszczki w okolicy uszu
- Włókniaki
- Drobne zmarszczki
- Wiotkość powiek górnych
- Blizny pooperacyjne
- Zmiany skórne
- Zmarszczki palacza
- Brodawki
- Kępki żółte





MASKA POZABIEGOWA PLASMA IQ

**Idealne
uzupełnienie
zabiegu z użyciem
PLASMA IQ**

W CELU UZUPEŁNIENIA
PROCEDURY ZAPROJEKTOWANO
DEDYKOWANE POZABIEGOWE
MASKI BIOCELULOZOWE.

NATURALNEGO POCHODZENIA,
JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
MASKI BIOCELULOZOWE,
ZOSTAŁY WZBOGACONE O:

- WYSELEKCJONOWANĄ
MIESZANKĘ CZYNNIKÓW WZROSTU
- NISKOCZĄSTECZKOWY KWAS HIALURONOWY
O DUŻYM POTENCJALE

- ALOE VERA

WSPOMAGAJĄ ONE ŁAGODZENIE
SKÓRY PO ZABIEGU ORAZ JEJ
OPTYMALNĄ REGENERACJĘ.

REZULTATY



1 ZABIEG Z UŻYCIEM PLASMA IQ NA GÓRNYCH POWIEKACH I 1 ZABIEG NA POWIEKI DOLNE ZAUWAŻALNIE POPRAWIA WYGLĄD SKÓRY OKOLICY OCZU.


1 ZABIEG Z UŻYCIEM PLASMA IQ NA GÓRNYCH POWIEKACH WIDOCZNIE REDUKUJE WIOTKOŚĆ - EFEKT 7 DNI PO ZABIEGU.



1 ZABIEG Z UŻYCIEM PLASMA IQ NA POWIEKACH GÓRNYCH WIDOCZNIE REDUKUJE WIOTKOŚĆ SKÓRY - EFEKT 2 MIESIĄCE PO ZABIEGU.



1 ZABIEG Z UŻYCIEM PLASMA IQ WYSTACZY, ABY UZYSKAĆ DOBRE EFEKTY MAŁYCH ZABIEGÓW CHIRURGICZNYCH.

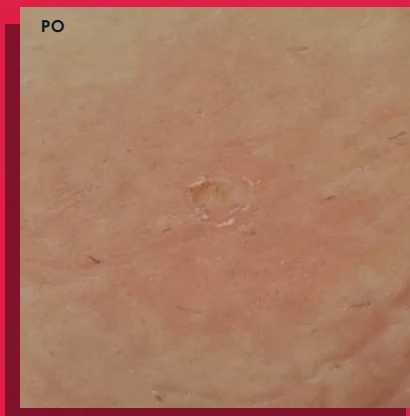

KONCENTRACJA SMART TECHNOLOGY

PRECYZJA NEAUVIA™

▶ SMART ENERGY

Inteligentna energia dostarcza dokładnie taką ilość energii, jaka jest potrzebna podczas zabiegu. Cztery poziomy mocy pozwalają na bezpieczne i skuteczne zabiegi na różnorodne wskazania i obszary:

- Redukcja opadających powiek
- Przebudowa wiotkiej skóry pod oczami
- Redukcja kurzych łapek i zmarszczek wokół oczu
- Redukcja zmarszczek wokół linii ust i uszu
- Usuwanie zmian skórnych

Niskie parametry dla cienkiej i wrażliwej skóry wokół oczu i ust.

Wysokie parametry do bardziej agresywnych zabiegów na grubszych i bardziej jędrnych obszarach skóry.

Możliwość korzystania z odpowiednich poziomów mocy może skrócić czas rekonwalescencji, wspomaga szybsze gojenie oraz minimalizuje ryzyko skutków ubocznych.

▶ PRECYZYJNE, WYSOKIEJ JAKOŚCI ELEKTRODY

Wysokiej jakości elektrody zapewniają precyzyjną i ściśle ukierunkowaną energię w celu uzyskania lepszych efektów zabiegowych.

Mniejsze uszkodzenia okolicznych obszarów, zmniejszają czas rekonwalescencji i wpływają, na jakość gojenia.

▶ POZABIEGOWA

Maska Neauvia™ Device, koł i odżywia skórę po zabiegu, wspomagając gojenie.

PRAKTYCZNOŚĆ NEAUVIA™

▶ BEZPRZEWODOWA

Wysoka moc w połączeniu z bezprzewodową głowicą oznacza całkowitą swobodę ruchów bez ujemnego wpływu na efekty zabiegowe.

▶ MINIMALNIE INWAZYJNE I SZYBKIE

Zabiegi Plasma IQ mogą być wykonywane w gabinecie, zajmując mniej niż 30 minut czasu, w zależności od obszaru zabiegowego i wskazań.

▶ EFEKTYWNOŚĆ KOSZTÓW

Niskie koszty elektrod i masek pozabiegowych.



NEAUVIA™ IN-HOUSE
ENGINEERING
& CONCIERGE SERVICE



SCT

SMART COMBINATION THERAPY

by NEAUVIA™

www.neauvia.pl

